

Micro-Touch® PF2

Puderfreier OP-Handschuh aus Latex

**Außergewöhnliche Kombination
von Tastempfindlichkeit und
Schutz**

Das Modell MICRO-TOUCH PF2 von Ansell ist ein puderfreier OP-Handschuh aus Latex der neuesten Generation. Dieser Handschuh wurde mit Hinblick auf die steigende Nachfrage für bestmögliche Tastsensibilität – Anziehverhalten, Griffsicherheit und Tragekomfort – in Verbindung mit bestmöglichen Schutz - eigenschaften für OP-Bereich entwickelt. Er ist Bestandteil einer umfassenden Ansell-Angebotspalette der modernsten und technisch hochwertigst entwickelten OP-Handschuhe auf dem Markt.

Alle OP-Verfahren



einen optimalen Schutz.

Die Qualitätskontrolle basiert auf AQL-Inspektionsverfahren: ein Wasserhaltetest mit einem AQL-Wert für Nadellöcher bei der Endfreigabe von 1,5 (GI) und 0,65 vor dem Verpacken (GII).

Die fettabweisende Latexzusammensetzung des Micro-Touch PF2 gewährleistet Stärke, Robustheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei allen chirurgischen Eingriffen. Der Handschuh bewahrt seine ursprüngliche Form auch nach Kontakt mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln und bei langwierigen Operationen.

Die synthetische Innenbeschichtung bildet einen Schutzschild und reduziert den Kontakt mit potenziellen Allergenen. Der Proteingehalt des Handschuhs ist aufgrund intensiver Auslaug- sowie Waschzyklen nach der Produktion sehr niedrig. Der Gehalt an Chemikalienrückständen ist ebenfalls sehr gering. Die hautfreundliche Materialmischung des Handschuhs enthält keine Thiurame oder Mercaptobenzothiazole (MBT).

Schutz aus einer praktischen Verpackung

Die PE – Verpackungen (Polyethylen), die das Umfeld nicht mit Papierfasern kontaminieren, lassen sich besonders leicht öffnen.

Die Hitzeversiegelung des Beutels trübt sich bei einem Fehler und zeigt damit an, dass das Produkt nicht mehr steril ist.

Komfort mit sicherem Griff

Das spezielle Design mit anatomisch geformten Fingern und Handflächen sorgt beim Micro-Touch PF2 für einen perfekten Sitz. Eine glättende Komponente in der dünnen Latexschicht bringt dem Operateur überdies eine hohe Bewegungsfreiheit und

ein sicheres Arbeiten mit den Fingerspitzen –
unter trockenen und nassen Bedingungen.
Ansell Health Care Europe NV
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01
E-mail: info@ansell.eu
http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

Einfaches Anziehen

Die synthetische Innenbeschichtung des Micro-Touch PF2 aus einer Wasser-/Polyurethan-Mischung erlaubt ein einfaches und bequemes Anziehen – auch beim Tragen von zwei Handschuhen übereinander für zusätzliche Sicherheit. Der Micro-Touch PF2 lässt sich selbst mit feuchten Händen problemlos anziehen, etwa beim intraoperativen Handschuhwechsel. Der Rollrand des Handschuhs verhindert ein Abrollen über die Hand.

Spezifikationen

Code	Size
352511	5.5
352512	6.0
352513	6.5
352514	7.0
352515	7.5
352516	8.0
352517	8.5
352518	9.0

Verpackungseinheit

50 Paar pro Spenderbox, 4 Spenderboxen pro Karton.



Ansell